

Výhody:

- Omezuje šíření kapének
- Pohodlná
- Znovu použitelná
- S možností desinfekce
- Lehká a robustní
- Cenově výhodná



Kontakt

Kayser Filtertech GmbH
Baustraße 38
37574 Einbeck

www.kayser-filtertech.com
masks@kayser-filtertech.com

Tel.: +49 (0) 5561 79020

Obličejová maska s výměnným filtrem



Popis produktu

- Robustní plastová maska s elastickými poutky na uši
- Ergonomicky tvarovaná
- Snadno vyměnitelný filtr
- Jednovrstvý výměnný filtr z potravinářské jehlové plsti PP/PET
- Plastová maska omyvatelná a dezinfikovatelná
- Výměnný filtr lze prát do 60 °C, použijte síťku na prádlo, NEŽEHLETE

Návod k použití:

- Před nasazením a sejmutím si důkladně umyjte a desinfikujte ruce
- Masky se nedotýkejte během nošení
- Noste přes nos a ústa
- Navlhlý výměnný filtr vyměňte a použitý výměnný filtr hermeticky zabalte
- Použité výměnné filtry co nejdříve vyperte nebo zlikvidujte jako komunální odpad
- Při nošení dodržujte bezpečnostní odstup 1,5 m

Certifikováno Německým institutem pro udržitelný rozvoj a ekonomiku

Nemá certifikaci dle DIN EN 14683 a 149:2001-10 Nejedná se o zdravotnický produkt, nejedná se o osobní ochranný pracovní prostředek


Nechrání před nakažením virem SARS-CoV-2 ani jinými viry či bakteriemi

Balení není sterilní


POZOR: Není vhodné pro děti do 6 let

Návod k sestavení na druhé straně

Zajistěte, aby plastová maska byla čistá a vydesinfikovaná.
Desinfikujte si ruce, aby nedošlo ke kontaminaci materiálu filtru.

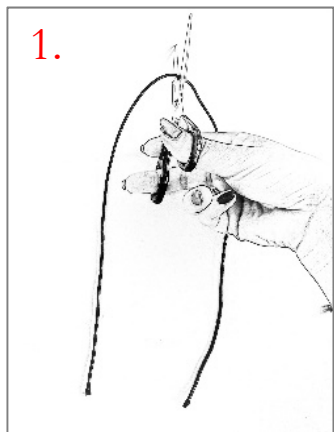


1. Elastický pásek uprostřed přestříhnete.

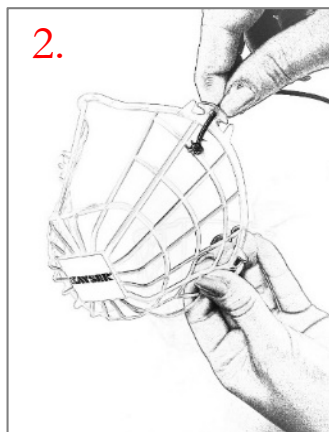


2. Pásek protáhněte horním otvorem plastové masky a před otvorem na něm udělejte uzel.




3. Nyní pásek provlékněte otvorem dole.

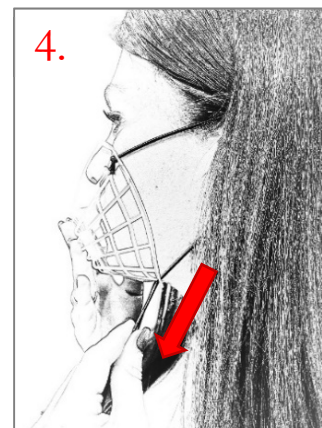


4. Nasadte si masku pro nastavení délky pásku. Masku by neměla škrtit.

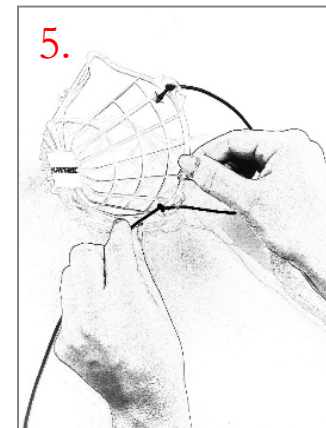


5. Udělejte uzel na pásce i před otvorem. Pro pozdější zkrácení pásků lze pásek omotat kolem držáku.

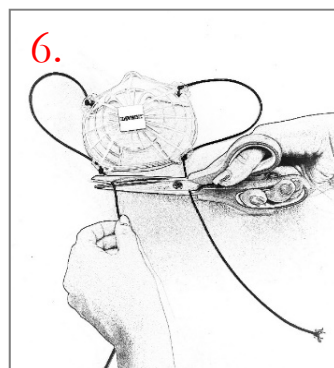


6. Postup opakujte u druhého pásku na druhé straně. Přebytný pásek odstříhnete.

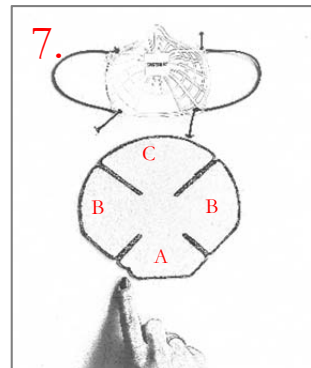


7. Výměnný filtr uchopte tak, abyste rovnou hranu měli před sebou. Pozor na to, aby se zářez nacházel na levé straně.

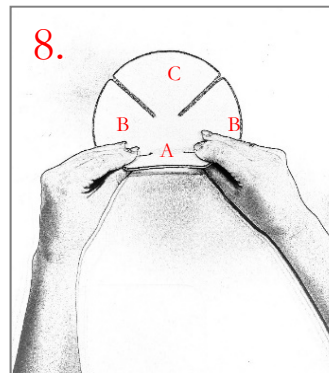

8. Výměnný filtr zatlačte do plastové masky tak, aby boční klopky (B) přesahovaly přes horní klopu (C) a aby spodní klopa (A) nepřesahovala přes boční klopky (B). Plastová maska musí být výměnným filtrem celá zakryta.

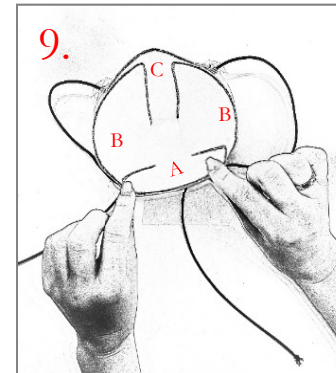

9. Stranu s rovnou hranou vyklopte nahoru. Uchopte masku.

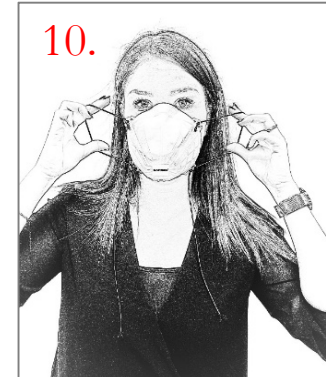

10. Masku si nyní nasadte. Masku je správně nasazená, pokud vás v žádném místě netlačí a nosič filtru po celém obvodu těsně přiléhá k obličeji.